

デュオメディ スムース

精緻で流麗

新しいデュオメディが本格販売！



●ご注文の際は、製品名のほか、①スタイル、②カラー、③つま先の有無、④サイズを順に数字で並べた7桁の品番をご指定ください。

<例> ①スタイル : 圧迫クラス2 パンティストッキング ショート丈 → XW17
 ②カラー : ブラック → 5
 ③つま先 : つま先無 → 0
 ④サイズ : M → 3
 最終的な品番 : XW17503


★品番

ピンクで色付けされているものはお取り寄せ対象となります。

①スタイル	ハイソックス	トップバンド付 ストッキング	パンティ ストッキング	②カラー
包装単位	1双	1双	1足	キャラメル 番号：1
各スタイル、つま先無・有 ともにスタンダードです。				ブラック 番号：5
				③つま先の有無をお選びください
				スタンダード 無（常時在庫） 番号：0
				スタンダード 有（常時在庫） 番号：1
				つま先無・有ともに料金は同じです。
				④サイズをお選びください
				番号 2 3 4 5 6
				サイズ S M L LL 3L
				サイズ表は裏面をご参照ください。

* 取り寄せ製品および欠品の製品は、お届けまで原則として約40日間かかります。

* デュオメディ スムースは、オプション製品を取り扱っておりません。

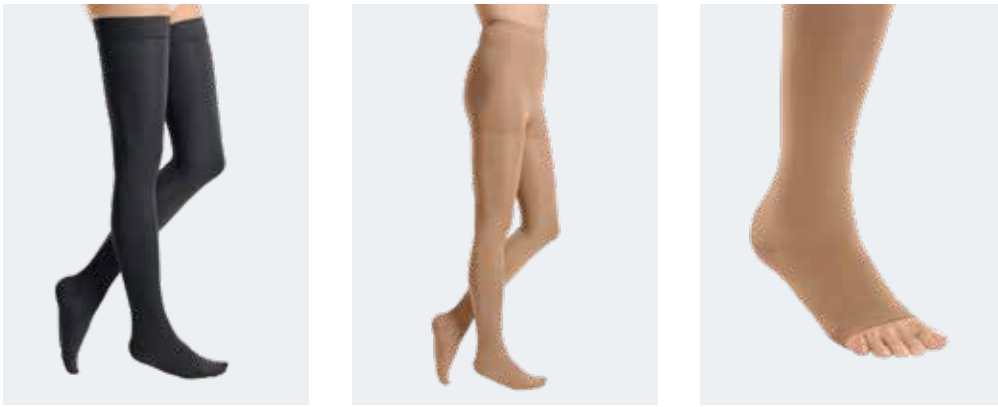

- ・デュオメディ スムースは、かすかに艶のある美しくて柔らかい素材を使用しています。
- ・デュオメディシリーズの特徴であるお求めやすい価格帯を維持しつつ、履き心地、ファッション性をさらに追求いたしました。

生地の厚み
ミドル
圧迫カクラス
CCL 1, 2

主な特徴


カラー
常時在庫

キャラメル (1)
ブラック (5)

採寸表

製品は、ご自身の①周径の採寸と②丈（長さ）を採寸いただき、お選びください。


①周径の採寸

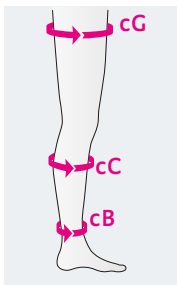

- cG 股下周：最も太い部位の周径
- cC ふくらはぎ周：最も太い部位の周径
- cB 足首周：最も細い部位の周径

周径 (cm)	S	M	L	LL	3L
cG	47-54	52-60	56-65	62-72	65-76
トップバンド付ストッキングの場合、cGの周径は上記の数値を目安にしてください。					
cG	42-57	48-64	54-71	60-78	65-85
cC	28-34	32-38	36-42	40-46	42-50
cB	19-21	22-24	25-27	28-30	30-32

②丈（長さ）の採寸

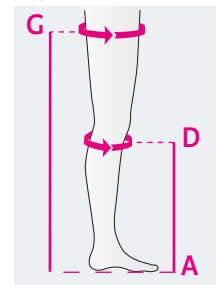

②丈（長さ）の採寸			
ハイソックス以外	A-G（股下からかかとまでの丈）		
ハイソックス	A-D（膝下からかかとまでの丈）		
ハイソックス以外 (A-G)	ハイソックス (A-D)		
丈 (cm)	丈 (cm)		
ショート丈	62-71	ショート丈	34-38
ロング丈	72-83	ロング丈	39-44

デュオメディ スムースのお手入れ方法

- ・装着後は、毎回洗濯してください。
- ・液温は40℃を限度とし、洗濯機でデリケートモード等、弱い洗濯が可能です。洗濯ネットを使用してください。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- ・柔軟剤は使用しないでください。
- ・日陰の風通しのよい場所で乾燥させてください。
- ・ドライクリーニングは行わないでください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥は可能です。(排気温度上限60℃)
- ・アイロン仕上げは行わないでください。



製品にラテックスは含まれておりません

繊維混用率 (%表示)	デュオメディ スムース	
圧迫カクラス	1	2
ナイロン	57	51
ポリウレタン	43	49

メディ・ジャパン株式会社

www.medi-japan.co.jp

カスタマーセンター（ご利用者様、医療従事者様向け窓口）

取り扱い業者様向け窓口（ご注文・在庫照会）

TEL : 0120-813-788

TEL : 03-5962-4306

email : customer-service@medi-japan.co.jp

FAX : 050-3116-1829

FAX : 050-3116-3007

受付時間

9:00 ~ 16:00

【オンラインストアからもご購入いただけます。】



※オンラインストアでは、クレジット決済が可能です。
※一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけない場合がございます。
<https://www.medi-japan.co.jp/shop>

新規の取引に関するご相談は、弊社営業までご連絡ください。

連絡先が不明の場合は、カスタマーセンターよりご案内いたします。

土日祝日はつながりません。また、年末年始に、休業日を設定いたします。